



SafeDon™

- ◆ Vägghängd dispenser
- ◆ Förbättrad hygien
- ◆ Reducerad handskförbrukning

ETT UNIKT DISPENSERSYSTEM FÖR HANDSKAR

Att använda handskar inom sjukvården är en grundläggande åtgärd där korrekt användning är avgörande.


SafeDon Hygiensystem erbjuder ett dispenseringsystem för handskar som säkerställer att handskarna distribueras en i taget, med manschetten först, för att upprätthålla optimal hygien.

SafeDon™-boxen placeras i en vägghängd dispenser med öppningen nedåt. När den första handsken dras ut hänger alltid en ny manschett redo för nästa användare. På så sätt undviker du att vidröra området runt boxen, handskarna i boxen och själva boxen.



EGENSKAPER

- ◆ Doserar **en handske i taget** med **manschetten först**
- ◆ Eliminerar **beröring av öppningen** och andra rena handskar inuti boxen
- ◆ Förhindrar att handskar faller ur lådan och **minskar därmed förbrukningen**
- ◆ Eliminerar beröring på handsken mest kritiska ytor - **tummar, fingrar och handflator**

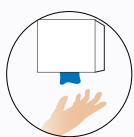

01 Ta den första handsken med din dominanta hand



02 Ta på handsken på den andra handen, greppa endast manschetten



03 Ta nästa handske med din handskbeklädda hand



04 Ta på handsken på din dominanta hand, greppa endast manschetten



05 Handskarna är nu på med minimal kontaminering

KORREKT ANVÄNDNING AV HANDSKARNA



SafeDon™ Hygiensystem

240 mm

250 st per kartong (XL 230 st)
2 000 st per transportförpackning (XL 1 840 st)
120 000 st per pall (XL 108 000 st)

Strl.	Bredd	Artikelnummer
XS	≤ 80	SDN-200-01
S	80 ± 10	SDN-200-02
M	95 ± 10	SDN-200-03
L	110 ± 10	SDN-200-04
XL	≥ 110	SDN-200-05



Tjocklek på handsken
Fingrar (15 mm från toppen)
Handflatan (mitten av handflatan)
Manschetten (25 mm från manschettkanten)

Enkel vägg (mm)
min. 0,07 max 0,09
min. 0,05
min. 0,05

Material Färg AQL 1.0
Nitril Blå

270 mm

200 st per kartong (XL 180 st)
1 600 st per transportförpackning (XL 1 440 st)
96 000 st per pall (XL 86 400 st)

Strl.	Bredd	Artikelnummer
XS	≤ 80	SDN-300-01
S	80 ± 10	SDN-300-02
M	95 ± 10	SDN-300-03
L	110 ± 10	SDN-300-04
XL	≥ 110	SDN-300-05



Tjocklek på handsken
Fingrar (15 mm från toppen)
Handflatan (mitten av handflatan)
Manschetten (25 mm från manschettkanten)

Enkel vägg (mm)
min. 0,11 ± 0,02
min. 0,08 ± 0,02
min. 0,07 ± 0,02

Material Färg AQL 1.0
Nitril Blå

Plast

Vägghållare

Metall




1-dispenser

Storlek: 93 mm x 130 mm x 139 mm

Art.nr: GL9665B

Färg: Vit ABS plast

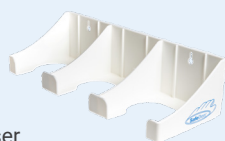

3-dispenser

Storlek: 93 mm x 370 mm x 139 mm

Art.nr: GL9666B



1-dispenser

Storlek: 93 mm x 130 mm x 139 mm

Art.nr: C-153-1

Färg: Metall



3-dispenser

Storlek: 93 mm x 390 mm x 139 mm


Art.nr: C-153-3

GENOMBROTSTIDER & CERTIFIERINGAR

Substans	Genombrottstid:	SDN-200	SDN-300	Certifieringar
1-Propanol 40%	>	30 min	>	60 min
Etanol 45-70%	>	10 min	>	10 min
Etanol 75%	>	10 min	>	60 min
Etidiumbromid 4%	>	480 min	>	480 min
Formaldehyd 37%	>	480 min	>	480 min
Glutaraldehyd 5%	>	480 min	>	480 min
Isopropanol 70%	>	10 min	>	10 min
Klorhexidindiglukonat 4%	>	480 min	>	480 min
klorhexidinsprit (5 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Natriumhydroxid	>	480 min	>	480 min
Väteperoxid 4%	>	60 min	>	60 min
Azacitidin (25 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Bortezomib (1 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Cisplatin (1mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Cyklofosfamid (20 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Docetaxel (10 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Doxorubicin HCl (2 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Epirubicin (2 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
5-Fluorouracil (50 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Irinotekan (20 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Karboplatin (10 mg/ml)	>	480 min	>	480 min
Oxaliplatin (5 mg/ml)	>	480 min	>	480 min

Godkänt för medicinskt bruk
Godkänt för livsmedelshantering
I enlighet med förordningen (2022:1274)
I enlighet med bestämmelserna i Förordning (EU) 2016/425
MDR 2017/745 (CE Klass I)
ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001
SA8000
EN ISO 420:2003
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374 (1-2)
EN ISO 374 (4-5)
EN 455 (1-4)
EN ISO 15223-1:2021

STUDIE

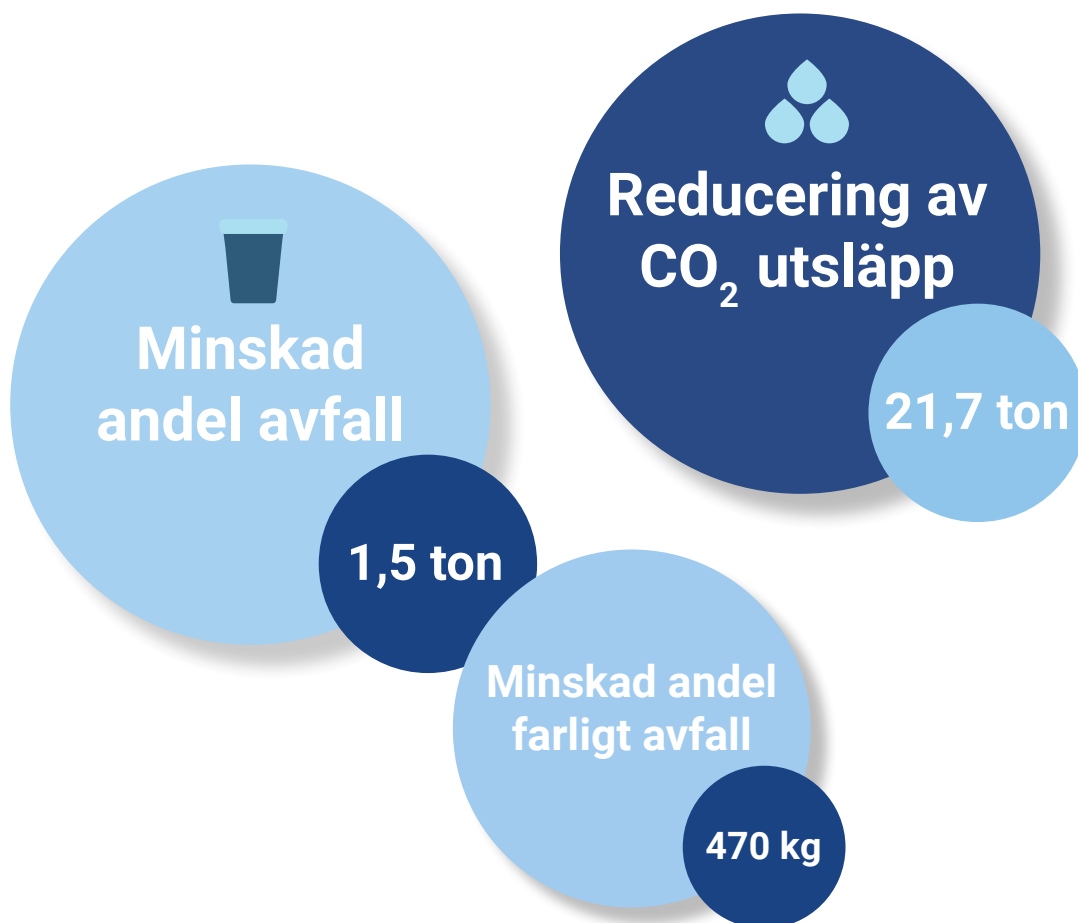

Per: 1 miljon handskar

Källa: LCA genomförd av NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) 2024



www.lbmedical.se