



VELA Meywalk 4

Manual. nr.: 106104

Art. nr.:**Modell**

MS014000

Micro

MS013000


Small

MS011200

Medium

MS011250

Large

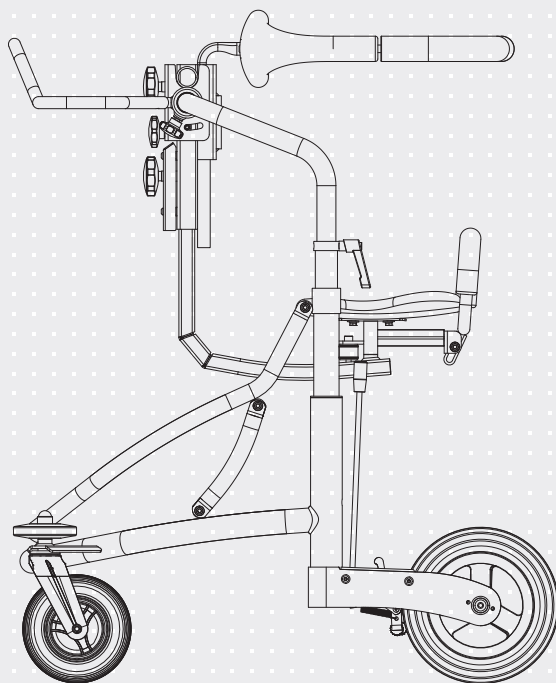ISO 9001
ISO 14001*Utformning varierar beroende på modell*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0. INLEDNING	3
1.1. VARNINGAR	4
1.2. FELSÖKNING	5
1.3. MARKERINGAR PÅ GÅSTOLEN	6
1.4. SÄKERHET	7
1.4.1. Avsedd användning	7
1.4.2. Transport	7
1.5. REKLAMATIONSRÄTT	7
1.6. UPPACKNING AV GÅSTOLEN	8
1.7. UNDERHÅLL	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Stomme	8
1.7.3. Klädsel	8
1.7.4. Återanvändningsguide	8
1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING	9
1.9. PRODUKTÖVERSIKT	9
2.0. ANVÄNDARHANDBOK	10
2.0.1. Montering av överdel och underdel	10
2.0.2. Montering och byte av fjädrar	10
2.0.3. Montering och byte av fjädrar (micro)	10
2.0.4. Höjdjustering	10
2.0.5. Broms	11
2.0.6. Justering av sitthöjd	11
2.0.7. Justering av kroppsstödet höjd	11
2.0.8. Lutningsfunktion	11
2.0.9. Kroppsstöd	12
2.0.10. In- och urstigning	12
2.0.11. Justering av handstyret	12
2.0.12. Användning av bakstopp	12
2.0.13. Justering av bakstoppet	13
2.0.14. Motståndsbroms	13
2.0.15. Backspärr	13
2.0.16. Riktningsspärr	13

1.0. INLEDNING

KÄRA KUND

Grattis till din nya VELA Meywalk 4. Vi är säkra på att den här gåstolen kommer att glädja dig dagligen. Denna bruksanvisning ger dig användbar information gällande installation, drift och underhåll.

OBS!

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Den ska alltid vara tillgänglig för användaren och medfölja gåstolen. Du kan också läsa bruksanvisningarna på www.vela-stolar.se, där det också finns annan relevant information.

Om du har frågor, upplever fel eller något händer oavsiktligt, vänligen kontakta din VELA-leverantör.

Vi förbehåller oss rätten till att göra ändringar i materialet.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela-stolar.se

1.1. VARNINGAR



Användning	Använd endast originalreservdelar tillhörande VELA.
Användning	Gör inga förändringar på tillbehören som medföljer gästolen.
Användning	Gästolen är ett hjälpmedel och bör endast användas till just det ändamålet.
Användning	Kontrollera att gästolens delar sitter fast ordentligt innan du använder den.
Användning	Gästolen får endast användas under tillsyn av annan person. Hjulen rullar väldigt enkelt och det är därför viktigt att hålla ett öga på omgivningen och eventuella faror som användaren kan råka ut för.
Användning	Gästolen måste alltid vara bromsad under in- och urstigning.
Användning	Lutningsstängan ska alltid höjas och sänkas för hand. Tryck aldrig ned stängan med foten.
Användning	På storlekarna Small, Medium och Large, finns det en lutningsstång som höjer och sänker gästolen vid in- och urstigning. Släpp aldrig lutningsstängan under höjning eller sänkning. Var beredd på en uppåtgående motkraft som ökar gradvis i takt med att stängan höjs. Släpp aldrig taget om lutningsstängan medan du höjer eller sänker maskinen då det kan vara till fara för både brukare och assistent.
Användning	Använd endast gästolen på fast yta. Undvik användning på sluttande, ojämnt, lösa, blöta eller isiga ytor då det kan leda till skada.
Användning	Fjädersystemet kan leda till att gästolen välter om den används av icke-stillastående användare. VELA Meywalk 4 får inte användas utan fjädrar.
Användning	Använd inte gästolenn under justering då de rörande delarna kan innebära klämrisk.
Användning	VELA Meywalk och dess tillbehör är utformade för din säkerhet. Avlägsning av utrustningens delar kan därför innebära öppna rörkanter som kan vara vassa och orsaka skada. Dessa öppna rörkanter måste täckas av plastproppar och bör därför inte röras med fingrar eller andra kroppsdelar.
Användning	Underhåll - förutom vanlig rengöring - ska alltid utföras av en professionell yrkestekniker.
Användning	Underhåll aldrig gästolen under användning.
Användning	Följ alltid rekommenderade underhålls- och rengöringsinstruktioner
Användning	Skydda gästolens vadderade ytor och klädsel från direkt solljus, eller täck de delar som kan bli väldigt varma och skada huden under användning.

1.2. FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak och lösning
Gåstolen kan inte vändas	Riktningsspärren kan ha aktiverats. Se avsnitt 2.0.16.
Bromsfunktionen fungerar inte	Bromsen är inte aktiverad. Se avsnitt 2.0.5.
Överdelen hänger i en vinkel mot ena sidan	Kontrollera att båda fjädrarna är korrekt monterade. Se avsnitt 2.0.2. eller 2.0.3.
Överdelen sitter fast	Kontrollera att båda fjädrarna är korrekt monterade. Se avsnitt 2.0.2. eller 2.0.3.
Gåstolen rullar dåligt	Hjulen blockeras av något. Rengör hjulen och ta bort eventuella trådrester, osv. Motståndsbromsen kan ha råkat aktiverats. Se avsnitt 2.0.14.
Gåstolen kan inte gås baklänges	Backspärren kan ha aktiverats. Se avsnitt 2.0.15.
Handstyret sitter löst	Skruva åt handtagen
Sätet sitter löst	Skruva åt handtaget
Sitthöjden är lägre än tidigare	Lossa på handtaget, flytta överdelen till önskad höjd och dra åt handtaget igen. Se avsnitt 2.0.4.
Kroppsstödet och lyftstolpen sitter löst	Skruva åt handtaget
Sitthöjden är lägre än tidigare	Lutningsstången kan ha fällt ner. Se avsnitt 2.0.10.

Vänligen kontakta din VELA-leverantör om ovanstående information inte löser ditt problem.

1.3. MARKERINGAR PÅ GÅSTOLEN

Märke	60 x 22,5 mm	
	De sista 6 siffrorna är produktens identitetssiffror (ID-nummer):	

Markeringar på gåstolen bör läsas från ca. 40 cm avstånd i normalt dagsljus. För markeringar gällande drift, se avsnitt 2.0.

1.4. SÄKERHET

Denna gåstol är CE-märkt och uppfyller gällande EU-föreskrifter.

Gåstolen är tillverkad av:
VELA, Gøteborgvej 8-12, DK-9200
Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. AVSEDD ANVÄNDNING

Den här apparaten är avsedd för barn och vuxna för att hjälpa dem att stå upp och röra sig trots att de har nedsatt eller ingen gångfunktion.

- :: Gåstolen måste alltid bromsas vid in- och urstigning
- :: Gåstolen får endast användas under tillsyn av annan person. Hjulen rullar väldigt enkelt och det är därför viktigt att hålla ett öga på omgivningen och eventuella faror som användaren kan råka ut för.

VELA Meywalk är testad och godkänd för följande maxbelastningar:

- :: VELA Meywalk 4 Micro: 60 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Small: 100 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Medium: 130 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Large: 130 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Gåstolen ska alltid vara bromsad vid transport med bil, flygplan eller annat transportmedel. Gåstolen är inte godkänd för användning som passagerarsäte i transportmedel och får inte användas som sådant.

Gåstolen får transporteras under följande miljöförhållanden:

Temperatur: - 20°C till + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

1.5. REKLAMATIONSRÄTT

VELA ger reklamationsrätt i enlighet med gällande lagstiftning i det land där gåstolen köpts. Rätten till reklamation och retur gäller endast efter användning av originalreservdelar och tillbehör, samt justeringar som utförts av professionell yrkespersonal.

OBS! Detta gäller om ett speciellt avtal har ingåtts direkt med VELA!

VELA tar inget ansvar för produkt- eller personskada som orsakats av:

- :: Transport
- :: Vanligt slitage
- :: Felaktig användning
- :: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är original
- :: Justeringar som utförts av obehörig person

1.6. UPPACKNING AV GÅSTOLEN

Gåstolen levereras i miljövänlig och återvinningsbar förpackning.

Om varan är defekt eller du misstänker att en transportskada kan ha skett, kontakta då din VELA-leverantör omedelbart. Försök inte reparera skadan själv eller börja använda varan.

Leveransen innehåller:

- :: VELA Meywalk 4 gåstol
- :: Kroppsstöd och fjädrar till gåstolen. Kommer i en separat låda tillsammans med installationsanvisningar. OBS! Måste monteras på gåstolen före användning!
- :: Användarhandbok till gåstolen

1.7. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att gåstolen inspekteras årligen för att identifiera delar som kan vara defekta eller slitna. Alla löstagbara delar bör regelbundet skruvas åt. Du kan hitta diverse instruktionsanvisningar på www.vela-stolar.se.

1.7.1. HJUL

Vi rekommenderar att hjulen inspekteras årligen och eventuella trådrester, osv. avlägsnas. Vissa golvtyper samlar smuts på hjulspåren. Rengör därför hjulspåren efter behov.

1.7.2. STOMME

Rengörs vid behov med ljummet vatten och pH-neutral tvål. Stommen kan desinfekteras, men lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel (som t.ex. Terpentin) får inte användas.

1.7.3. KLÄDSEL

Syntetiskt tyg/konstläder: Rengör med välutvriden trasa med vatten eller mild tvål.

Polyuretanskum: Klädsel på kroppsstöd, handtag och bakstopp kan enkelt torkas av med en desinfektionstrasa.

OBS! På www.vela-stolar.se hittar du rengöringsinstruktioner för alla våra standardklädseltyper.

1.7.4. ÅTERANVÄNDNINGSGUIDE


Din VELA Meywalk 4 kan återanvändas av någon annan efter att du inte längre behöver den, förutsatt att den underhålls av en tekniker i förväg.

Gåstolens förväntade livslängd är 5 år vid normal och korrekt användning. Vi rekommenderar att VELA, din VELA-leverantör eller utbildade tekniker utför en årlig inspektion där eventuella slitna delar blir utbytta.

1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING


Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Därför måste produkten återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser och inte som allmänt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra att både miljö och människor påverkas negativt.

1.9. PRODUKTÖVERSIKT

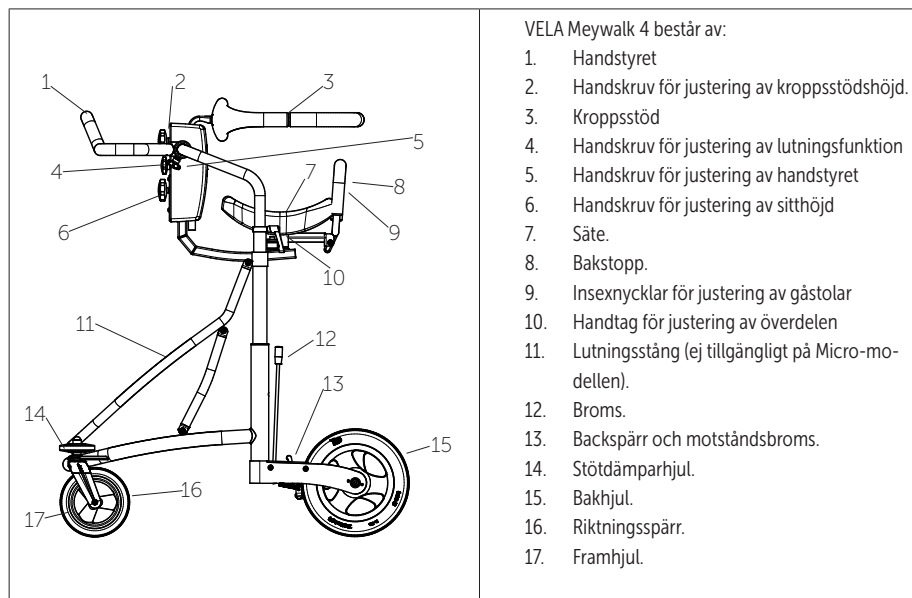

VELA Meywalk 4 har ett brett utbud av tillbehör som gör det möjligt att anpassa gästolen till varje enskild användares behov. Urvalet av tillbehör till VELA Meywalk 4 hittar du på www.vela-stolar.se.


2.0. ANVÄNDARHANDBOK

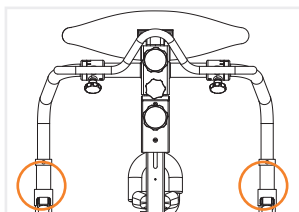

2.0.1. MONTERING AV ÖVERDEL OCH UNDERDEL


Överdelen placeras i stolparna på underredet. Överdelen sänks sedan ned på plats inuti de två stolparna.

OBS! Styret måste vara vänt mot de vridbara framhjulen.

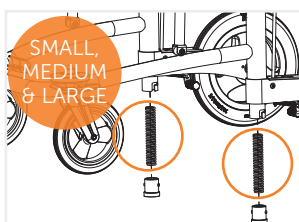


2.0.2. MONTERING OCH BYTE AV FJÄDRAR

Lossa på lutningsstängens och höj den till övre position så att de nedre fästena syns framför bakhjulen. Tryck och vrid på den svarta bottenpluggen så att den kan tas av och du tydligt kan se fjäderns placering. Montera/byt ut fjädern, sätt in pluggen i spåret och vrid den på plats tills att den sitter ordentligt.

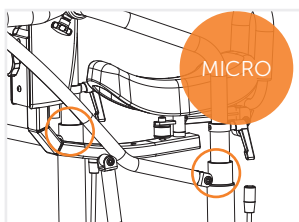


2.0.3. MONTERING OCH BYTE AV FJÄDRAR (MICRO)

Lyft överdelen på gästolen (se avsnitt 2.0.1.) Fjädrarna kan därefter enkelt monteras/bytas ut.

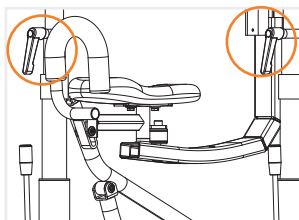

2.0.4. HÖJDJUSTERING


Lossa på handtagen på båda sidor och justera ramen till önskad höjd. Det är viktigt att höjden är lika på båda sidor av ramen. Dra åt igen på båda sidor. **OBS!** Utför aldrig höjdjustering medan gästolen används.

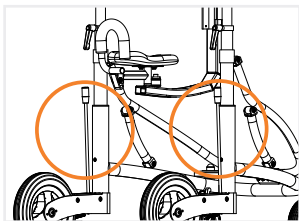

2.0.5. BROMS


Bromsen är placerad framför bakhjulen. För båda bromsarna bakåt för att aktivera bromsfunktionen på bägge sidor. Bromsarna inaktiveras genom att båda bromsstavarna förs framåt igen.

OBS! Bromsen måste alltid vara låst vid in- och urstigning.

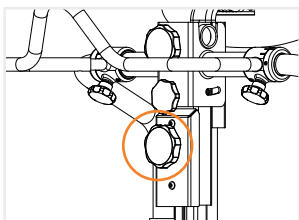


2.0.6. JUSTERING AV SITTHÖJD

Lossa på den nedre handskruven (tryck-och-vrid) på gästolens framsida. Sätet kan nu justeras uppåt och nedåt. En hand under sätet gör att sätet glider enkelt. Justera sitthöjden efter användarens steglängd och dra åt handskruven så att sätet sitter på plats. **OBS!** Justera aldrig sitsens höjd medan gästolen används.

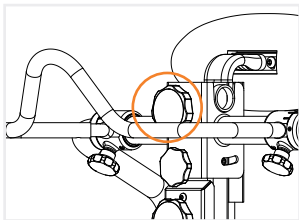


2.0.7. JUSTERING AV KROPPSSTÖDETS HÖJD

Lossa på den övre handskruven (tryck-och-vrid) på gästolens framsida. Justera till önskad höjd och dra åt handskruven igen. Korrekt höjd varierar beroende på användarens kropp och behov av rörelsefrihet. Lossa de två insexskruvarna på framsidan av kroppsstödet för att byta ut det. **OBS!** Byt aldrig ut kroppsstödet medan gästolen används.

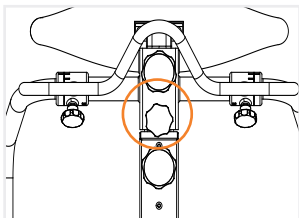


2.0.8. LUTNINGSFUNKTION

Vrid den mittersta handskruven på gästolens framsida för att luta på den. Genom att vrida på handskruven kan du ändra vinkel på kroppsstödet och sätet så att användarens hållning förändras. Lutningsfunktionen är steglös. **OBS!** Justera aldrig lutningen medan gästolen används.

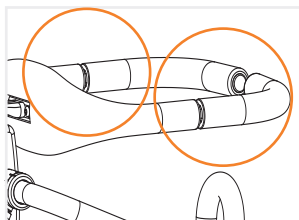


2.0.9. KROPPSSTÖD

Du öppnar på kroppsstödet genom att föra de yttre handtagen (på baksidan) uppåt. Kroppsstödet stängs genom att föra handtagen nedåt igen så att öppningen blir mindre. **OBS!** Kroppsstödet måste alltid vara stängt under användning av gästolen.

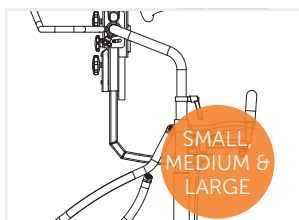

2.0.10. IN- OCH URSTIGNING


Ta tag i framsidan av lutningsstången* med båda händerna och luta den i önskad riktning. Du kan på så sätt sänka sätet, vilket underlättar under in- och urstigning (Micro kan inte lutas). Sätet kan höjas igen genom att trycka ned lutningsstången tills den låses i klickhaken med ett hörbart klickljud. **OBS!** Kom ihåg att låsa kroppsstödet (se avsnitt 2.0.9.) och bakstoppet (avsnitt 2.0.12.) medan gästolen används.

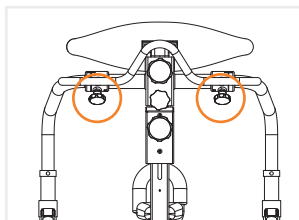

2.0.11. JUSTERING AV HANDSTYRET

Vinkeln på handstyret justeras med hjälp av två handskruvor. Vrid handskruvorna moturs så att handtaget kan rotera. Det finns tre standardinställningar för handstyret. Kom ihåg att dra åt handskruvorna igen.


OBS! Handtaget kan vinklas i vertikal position så att användaren enkelt kan komma åt t.ex. arbetsbord och köksbord.

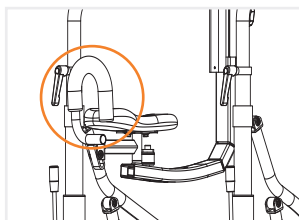

2.0.12. ANVÄNDNING AV BAKSTOPP


Bakstoppet ska alltid vara uppe medan gästolen används. Skjut bakstoppet uppåt så att det vilar mot sätet och sitter i låst position. Lyft bakstoppet uppåt och vänd det nedåt för att öppna igen när användaren ska kliva ut ur gästolen.

*Släpp aldrig taget om lutningsstången under justering.

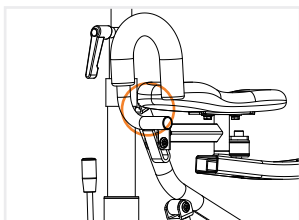


2.0.13. JUSTERING AV BAKSTOPPET

Bakstoppet måste sänkas så att du kan se en insexskruv inuti den fyrkantiga profilen. Lossa på skruven och justera till önskat läge. Kom ihåg att dra åt insexskruven igen efteråt.

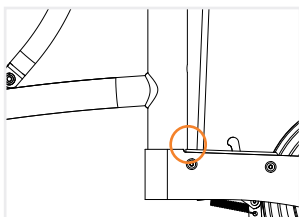

2.0.14. MOTSTÅNDSBROMS


Du ökar gångmotståndet genom att aktivera motståndsbromsen. Detta kan både minska hastigheten (båda sidor) och korrigera sned gång (en sida). Lossa på muttern längst ner på skruven och justera skruven tills önskat motstånd uppnås. Dra åt muttern igen efteråt. **OBS!** Motståndsbromsen justeras separat på båda sidor.

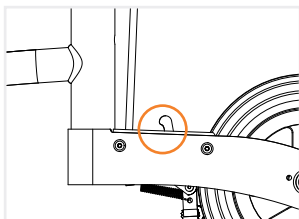

2.0.15. BACKSPÄRR

Genom att aktivera backspärren på båda bakhjulen kan gästolen bara flyttas framåt. Aktivera denna genom att lyfta silverspaken uppåt och inaktivera den genom att trycka ned den svarta knappen.

OBS! Aktivera/inaktivera alltid backspärren på båda sidor.

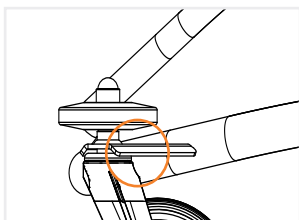

2.0.16. RIKTNINGSSPÄRR

Genom att aktivera riktningsspärren kan gästolen bara röra sig i en rak linje framåt/bakåt. Vrid på snäpplåset medan hjulet står rakt på stället så att låshaken träffar hålet i hjulgaffeln. Inaktivera genom att vrida snäpplåset bakåt och vrida det till låst läge, så att hjulet kan rotera fritt. **OBS!** Aktivera/inaktivera alltid riktningsspärren på bägge sidor.

