



Användarmanual

Portabel toalettsitsdyna



INNEHÅLL

Avsedd användning	2
Instruktioner	3
Delar	3
Specifikationer	3
Begränsad garanti	4
Produktskötsel	4
Kundtjänst	4

AVSEDD ANVÄNDNING

Special Tomato Portable Potty Seat är en vadderad toalettstolssitsdyna som fungerar i flera olika miljöer. Special Tomato portabel Potty Seat är tillverkad av Special Tomato Soft-Touch-material, ett perfekt alternativ för toalettbesök som är vätsketätt och motståndskraftigt mot sprickor och rivning. Soft-Touch-materialet formar sig efter kroppen och minskar trycket på beniga utskott vid längre sittperioder.

Portable Potty Seat finns i två versioner: Standard (för runda toaletter) och Oval (för avlånga toaletter). Portabel Potty Seat levereras med en egen Canvas Travel Tote med dragkedja. Väskan har en stor ytterficka för att förvara våtservetter och två mindre nätfickor för andra nödvändigheter. Insidan av väskan är gummibelagd och kan enkelt torkas ren för att desinficera. Väskan kan maskintvättas.

 **Varning:** Förhindra allvarliga skador eller dödsfall från fall eller att barnet glider ur.

- Doppa inte i vatten
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt
- Håll alltid barnet under uppsikt

INSTRUKTIONER:


Placera den portabla toalettsitsdynan över din befintliga toalettstol med puckeln vänd framåt.

DELAR


Rund eller Oval



SPECIFIKATIONER

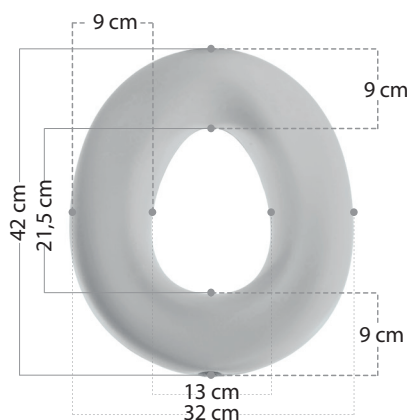

Oval

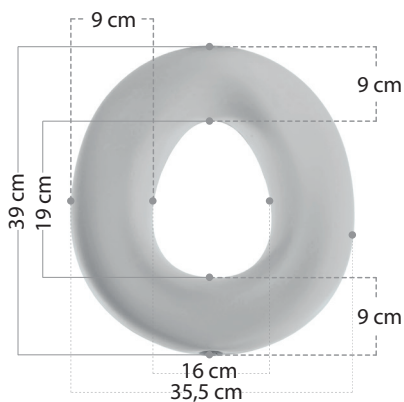

Rund

BEGRÄNSAD GARANTI

Bergeron by Design garanterar för den ursprungliga detaljhandelsköparen av Special Tomato®-produkten att om någon del eller komponent visar sig vara defekt i material eller utförande inom fem år från inköpsdatumet, kommer den defekta delen att repareras eller bytas ut (efter Bergeron by Designs bedömning) utan kostnad. Garantiservice kan utföras av ett auktoriserat servicecenter eller (efter Bergeron by Designs bedömning) av fabriken.

Denna garanti täcker inte normalt slitage eller skador som orsakats av olyckor eller felaktig användning.

För att utnyttja denna begränsade garanti bör användaren först erhålla ett Returautorisationsnummer från återförsäljaren där Special Tomato®-produkten köptes. Produkten måste levereras med förbetalda fraktkostnader (UPS rekommenderas) till fabriken eller till ett auktoriserat servicecenter, tillsammans med en kopia av det ursprungliga kvittot, Returautorisationsnumret och en skriftlig beskrivning av problemet.

PRODUKTVÅRD

Special Tomato®-produkter är vätsketäta. Torka av med ett mildt rengöringsmedel vid behov.

Doppa inte produkten i vatten för att undvika att vatten tränger in i luftventilen.

KUNDTJÄNST

Kontakta din återförsäljare direkt eller kontakta kundtjänst på Global Carehab.

Observera: Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till annat språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt – elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt – utan föregående skriftligt medgivande från Bergeron by Design.

Använd endast Special Tomato®-tillbehör och delar på Special Tomato®-produkter. Special Tomato®-delar är inte utbytbara med produkter från andra tillverkare. Byt omedelbart ut slitna delar för säkerheten.

© 2022 Bergeron By Design.



Bergeron Health Care
22 South Second Street
Dolgeville, NY 13329



Global Carehab
HOLMSTRUPGAARDVEJ 11
8220 BRABRAND
DENMARK
+45 24 65 55 50



DISTRIBUTÖR



L&B Medical AB
Tillverkarvägen 5
18766 Täby
Sverige
+46 08 732 04 80

© 2022 Bergeron Health Care

Informationen som anges här kan ändras utan föregående meddelande.