

Bruksanvisning och monteringsanvisning

Sitter Seat



Denna bruksanvisning ger information om montering, säkerhetsmeddelande och rekonditioneringsanvisningar av sitsen Sitter Seat. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Sitter Seat med tillbehör.

Innehållsförteckning

Allmän information	3
Användningsområde	3
Produktansvar och säkerhet	4
Garanti och hållbarhet	4
Service och reparationer	4
Sitter Seat - Introduktion	5
Säkerhetsmeddelande	6
Kontroll vid leverans	7
Varning - Kvävningsrisk!	7
Montering av höft- och bröstbälte	8-10
Montering av Sitter Seat på stol	11
Sittvinkel	12
Tillbehör: Mobility Base och Stationary Base	
Tillbehör: Floor Base och MAT - Mobile Activity Tray	15
Rekonditionering, underhåll och skötsel	16
Teknisk fakta	17

L&B MEDICAL AB

Tillverkarvägen 5
187 66 Täby

Tel 08-732 04 80

info@lbmedical.se
www.lbmedical.se

Allmän information

Sitter Seat är en komplett sits för barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd för att kunna sitta självständigt i sulky, stol eller annan sittmöbel. Sitter Seat är framtagen och designad för personer, med rörelsehinder, som behöver kunna sitta både bekvämt och säkert.

För att kunna använda Sitter Seat så säkert som möjligt ber vi dig läsa denna bruksanvisning först, innan sitsen tas i bruk. Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med Sitter Seat.

Användningsområde

Sitter Seat är en sits för personer som på grund av funktionsvariationer har svårt att sitta själva. Observera, endast en person åt gången får sitta i sitsen.

Använd alltid bälte och höftbälte så att personen sitter säkert och inte kan ramlas ur sitsen. Sitsen skall monteras och sättas fast av en vuxen person.

Sitsen kan användas på stolar, i sulkyvagnar, i flygplanssäten m m. Det finns flera tillbehör till sitsen såsom underredet med hjul, Mobility Base. Underredet utan hjul, Stationary Base och underredet Floor Base, är båda stationära underreden.

Observera att Sitter Seat inte får användas som bilbarnsstol.

Produktansvar och säkerhet

Sitsen Sitter Seat är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sitsen Sitter Seat uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget Special Tomato försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Sitter Seat är CE märkt enligt (EU) direktiv 2017/745 MDR om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

5 års Garanti

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Sitsen Sitter Seat har 5 års garanti. Garanti gäller endast om sitsen förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs enligt denna

Service och reparationer

Service och reparationer på sitsen Sitter Seat med tillbehör skall endast utföras av behörig personal som till exempel hjälpmedelstekniker, efter överenskommelse med L&B Medical AB, eller av en representant från företaget L&B Medical AB.

Var noga med att alltid dra åt fastsättningsremmar och bälten efter justering.

Lämna aldrig någon som sitter i sitsen ensam!

Sitter Seat Introduktion

Sitter Seat finns i fem storlekar. Sitter Seat är tillverkad för att passa barn, tonåringar och vuxna som behöver sitta med stöd för bålen och bäckenet. Bålstödsbältet och höftbältet ger stabilitet och trygghet och skall anpassas individuellt för personen som sitter i sitsen. Sitter Seat får monteras på följande underrede Floor Base, Mobility Base, Stationary Base, samt på stolar och i sulkys. Kontrollera alltid att Sitter Seat sitter fast ordentligt före användning!

1. Ryggstöd
2. Vertikala skåror i ryggstödet
3. Brösthälte (5-punktsbälte)
4. Höftbälte (3-punktsbälte)
5. Abduktionsklossförhöjning
6. Fastsättningsrem vid sits

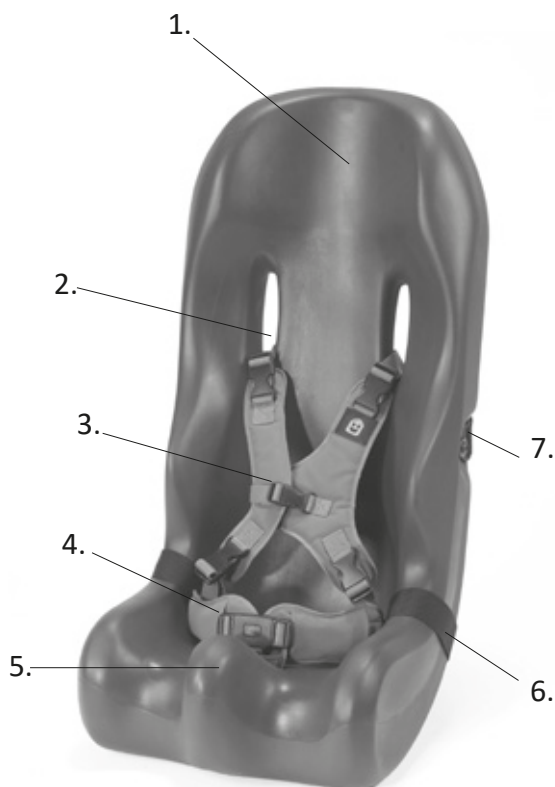


Bild 1

Säkerhetsmeddelande



Läs hela bruksanvisningen innan du använder sitsen Sitter Seat. Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten. Prova gärna praktiskt att montera sitsen på olika sittmöbler innan någon person placeras i sitsen.

Som förälder, målsman eller annan vårdgivare är du ansvarig för säkerheten. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som finns runt personen som använder sig av hjälpmedlet om hur produkten fungerar och skall användas.

Var noga med att sitsen alltid sitter fast ordentligt varje gång du sätter i eller tar barnet ur sitsen. Är sitsen monterad i en sulky, rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel, se alltid till att parkeringsbromsa vagnen/rullstolen.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2 för kontaktinformation.

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Sitsen Sitter Seat med fastsättningsbälte i sidorna.
- 5-punktsbälte / Bålbälte
- 3-Punktsbälte / Höft-och grenbälte
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning på svenska



Bild 2



Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sitsen under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningsrisk!



Bild 3

Montering av höftbälte och bröstbälte

Lägg sitsen Seat Sitter med ryggen mot bordsskivan

Placera höftbältet genom öglan på abduktionsbältet.

För därefter abduktionsbältet genom skåran i sitsens framkant, bild 4.



Bild 4



Bild 5

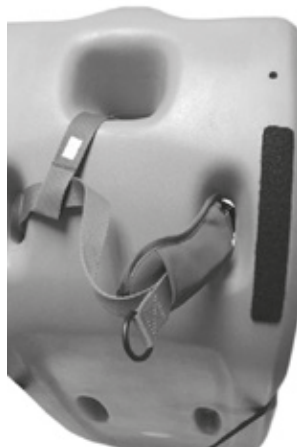


Bild 6

Höftbältet dras sedan genom den vänstra bakre skåran, bild 5, därefter genom den högra på sitsens undersida, bild 6.

Knäpp ihop låset och justera remmarna för lagom längd, bild 7.



Bild 7



Bild 8

Knäpp loss ett av axelbanden.



Bild 9

Trä bandet genom de två ryggskårorna, se bilder.



Bild 10

Trä de två nedersta banden genom ryggens nedersta skåror. Sätt fast banden under sitsen.



Bild 11

Brösthäftet skall sitta så här!



Bild 12

På bilden ovan ser man hur bältena skall sitta. Tänk på att bältena skall vara anpassade för personen som sitter i sitsen. Eventuellt behöver man ändra längden på remmarna beroende på olika kläder mm.

VIKTIGT!

Byxor som bildar veck eller liknande kan orsaka irritation, dra försiktigt i kläder så att tyget blir så slätt som möjligt nära huden.

Hur man sätter fast sitsen Sitter Seat på en stol.

Fastsättningsremmen, som är lös, skall träs i de bakre skårorna runt sitsens undersida och komma upp på var sida om Sitter Seat för att slutligen knäppas runt den önskade stolens sittyta, se bild 13 och 14.

Fastsättningsremmen som är fastskruvad i ryggdelen skall om möjligt alltid sättas runt stolens rygg.



Bild 13

OBSERVERA!

Sitsen Sitter Seat **får inte** användas som bilbarnstol. Välj en bilbarnstol som är krocktestad, t ex Recaro Monza Nova 2 Reha bilbarnstolen, se mer på www.may-dayaid.se.



Bild 14

Sitsvinkeln

Under sitsen finns två kardborreband. På underredet finns två anpassade kardborreband, placera sitsen i önskad lutning, se bild 5.

Därefter är det viktigt att spänna fast sitsen med fastsättningsremmarna, dels runt sittdelen, dels runt ryggen när Sitter Seat monteras på de olika underreden.

Önskar du ändra sittvinkeln börjar du först med att knäppa loss fastsättningsremmarna!



Bild 15

På bild 15 är Sitter Seat monterad på underredet Mobility Base. Vid montering använd endast fastspänningsremmen runt sittdelen.

På bild 16, här till höger, sitter Sitter Seat monterad på det låga golvunderredet Floor Base.



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19

Sitter Seat kan med fördel användas monterad på olika underredet. Här ovan syns Sitter Seat på det låga golvunderredet Floor Base - bild 17, mobila träunderredet Activity Base - bild 18 och monterad på en vanlig kökstol bild 19. Nedan syns Sitter Seat placerad i sulkyn EIO från Special Tomato, se bild 20.



Bild 20

Tillbehör: Mobility Base underrede på hjul

Underredet Mobility base är tillverkat i trä och har fyra hjul på vardera ben. Mobility Base finns i två storlekar. Alla fyra hjulen kan bromsas. Hjulen är massiva och ledade.

På sittytan sitter två kardborreband för att förenkla fastsättningen av sitsen i olika vinkelpositioner.



Bild 21

Tillbehör: Stationary Base Stationärt underrede

Underredet är tillverkat i trä och har fyra stödfötter. Stationary Base finns i två storlekar.

OBS!

På bilden 22 sitter Sitter Seat, monterad på underredet Stationary Base.



Bild 22

Tillbehör: Floor Base Lågt golvunderrede

Golvunderredet är tillverkat i samma material som sitsen. På bilden syns dem två kardborrebanden som håller sitsen i önskad sitsvinkel. Golvunderredet används oftast vid lek och gemenskap vid golvaktiviteter.



Bild 23

Tillbehör: "MAT" Mobile Activity Tray, vinkelställbart bord

Bordet MAT kan dels både höjas och sänkas, dels kan bordsskivan också vinklas. Hjulen är massiva, de två främre hjulen är ledade och kan bromsas.



Bild 24

Rekonditionering, underhåll och skötsel

Bålbältet och höftbältet kan tvättas i maskin
Fintvätt 40 °C, lägg gärna bältena i en tvättpåse.
Vi rekommenderar att lägga bältena plant för
torkning, torktumla inte.

Sitsen Sitter Seat bör tvättas av med varmt vatten
och mildt rengöringsmedel med en tvättlapp/tra-
sa. Sitsen kan torkas av med desinfektionsmedel.



**OBS! Vatten eller annan vätska
får ej komma in i ventilen!**



Sand, hår och skräp förstör hjulens förmåga att rulla. Håll därför hjulen på underredet
Mobilitye Base och bordet MAT, så rena som möjligt.

Alla ytor, trä och chassiram kan torkas av med fuktig trasa och milda rengörings-
medel till exempel diskmedel. Vid behov desinfektera hjälpmidlet med ytdesinfek-
tionsmedel med tensid, alternativt ett oxiderande ytdesinfektionsmedel. Använd
inte stålull eller liknande material vid rengöring. Sitsen med tillbehör skall förvaras
inomhus.

Sitsen Sitter Seat kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion,
var vänlig följ checklistan nedan.

Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bälten, fastsättningsremmar	X		
Parkeringsbroms	X		
Skravar, fastsättningsrem		X	
Hjul			X

Teknisk fakta Sitter Seat

Mått i mm	Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4	Stl 5
Sittdjup	175	240	290	340	400
Sittbredd	200	250	300	350	400
Ryggstödshöjd	520	650	720	870	970
Ytermått sittdjup	300	350	400	475	525
Ytermått bredd	300	350	400	450	500
Ytermått höjd	625	725	850	1000	1100
Höjd från golv till sittyta: Floor Base	127	138	138		
Mobility Base	318	337	330	375	405
Stationary Base	254	254	246	292	318
Sitsens vikt	2,7 kg	4,5 kg	6 kg	7 kg	8,6 kg
Ca vikt på användare	9-14 kg	14-27 kg	16-36 kg	23-50 kg	41-91 kg
Ca ålder på användare	1-2 år	2-6 år	6-9 år	9-14 år	13 år-vuxen
Ca längd på användare i cm	75-87	87-120	100-140	125-162	135-185

Sitter Seat

Säljs i Sverige genom

L&B Medical AB

Tillverkarvägen 5

187 66 Täby

Tel 08-732 04 80

info@lbmedical.se

www.lbmedical.se



Producent

Special Tomato

Bergeron By Design

15 South Second Street

Dolgeville, New York

Tel +1-315-429-8407

Fax +1-315-429-8862

customerservice@specialtomato.com

www.specialtomato.com

