

Tvättinformation Swiftyklädsel

Swifty, en enkel sulky, som finns i två storlekar och med klädsel i Trevira.

En av det stora fördelarna med tyg vävt i Trevira CS är dess tvätt egenskaper. Om klädseln är avtagbar kan man maskintvätta det i 60° c. Tyg vävt i Trevira CS går att återvinna till 100 %.



1. 2.



3.



1. Ta av klädseln från rygg och sits samt från de två sidostöden. Klädseln sitter fast med kardborreband.
2. Tvätta klädseln i tvättmaskin 60° C.
3. Torka klädseln, lägg klädseln plant och luftigt, se bild.

Tvättinformation Swiftyklädsel

4.



5.



6.



4. Klädseln efter tvätt. Börja med att montera övre ryggstödsklädseln.
5. Kardborrebanden på sidostöden monteras enklast fram, på utsidan, som på bilden.
6. Klädseln monterad och sulky Swifty klar att användas.

Mer information hittar du i **användarmanualen**