

Monteringsanvisning

Höftbälte, 2-punkts art nr 8420/1



1. Börja med att öppna klädseln på sulky Swiftys rygg, klädseln sitter fast med hjälp av kardborreband. Ta eventuellt bort bälten som redan sitter monterade.
2. Placera höftbältet i sitsen. Led bältesremmarna bak vid klädseln sidohål, använd gärna nedre lås-klämmorna för att höftbältet skall hamna över bäckenbenet på barnet.
3. Sätt ihop bältet och prova att bältet sitter säkert fastmonterat och att bältesremmarna inte är snurrade. Dra slutligen ihop ryggklädseln med kardborrebanden.