

Rekonditioneringsanvisning och skötsel Sitter Seat

Standardutförande:

Sitsen Sitter Seat är en kombinerad rygg och sittdyna med fast ryggvinkel. Det finns två genomgående hål i ryggen för axelband, två hål i nedre delen av ryggen för höftbälte samt ett hål i sitsens framkant för grenselen. På sitsens rygg finns två kardborreband för tiltning/fixering av sits på tillhörande underredet.

På sitsens sidor finns två fastsättningsremmar fastskruvade i sitsens stomme, se bild 1.

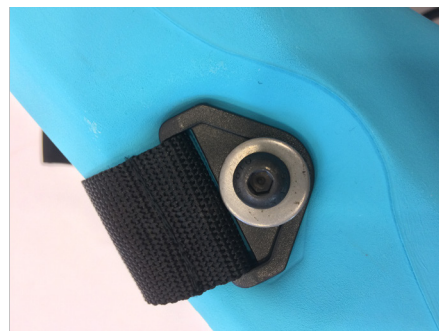


Bild 1

Sitsen Sitter Seat finns i fem storlekar. På ryggens baksida på vänster sida finns ett nummer tryckt - relief som anger sitsen storlek, se bild 2.



Bild 2

Skötselanvisning:

På baksidan av sitsens rygg finns en ventil, se bild 3.

OBS! Vatten eller annan vätska får ej komma in i ventilen!



Sitsen Sitter Seat bör tvättas med varmt vatten och mildt miljövänligt rengöringsmedel.

Sitsen kan torkas av med desinfektionsmedel.

Rekonditioneringsanvisning:

Kontrollera att fastsättningsremmarna på sidan sitter fast ordentligt och att spännena är hela och fungerar utan anmärkning.

Delar som har spruckit eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas.



Bild 3



Bild 4

Kontrollera efter avslutad rekonditionering att:

- Bälten fungerar och sitter fast stadigt.
- Sitsen sitter ordentligt fast med sina fastsättningsremmar.
- Sittvinkeln går att fixera dvs kardborrebanden är rena och sitter fast - fäster.



Bild 5