

Servicemanual Sitter Seat


Serviceinformation

Underhållet av ett hjälpmedel / Medicinteknisk produkt ansvarar ägaren för. Om inte underhåll följs upphör garanti att gälla. Tänk på att en produkt som inte servas äventyrar säkerheten både för användare (brukaren) och vårdaren.

- A. Läs igenom bruksanvisningen noggrant för användning av produkten.
- B. Spara bruksanvisningen och ev bifogade verktyg, behåll dem för framtida behov.
- C. Rengör produkten med en fuktig trasa dagligen eller efter användande.
- D. Gör en visuell inspektion dagligen, kontrollera att höft-grenbältet och bröstbältet fungerar och sitter monterat på rätt sätt, se bild.
- E. Kontrollera fastsättningsremmen som löper i sitsens sidohål, sitter monterad rätt och att spännena fungerar.



Kontrollera att det på sitsens båda sidor finns två skruvar som sitter fast i sitsens rygg och håller sitsens monteringsremmar på plats.

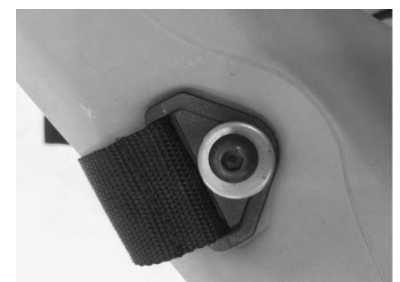

Skötselanvisning:

Kontrollera dagligen:

- Att alla skruvar är åtdragna och varken skruvar eller brickor saknas.
- Att inga vassa, skarpa kanter har finns på ytan.
- Att bälten och fassättningsremmarna är rätt placerad och att låsspännen fungerar.
- Att rengöra kardborrebanden genom att borsta dem rena och fria från damm och smuts.

Tvättanvisning:

Sitter Seat ska torkas ren med varmt vatten och milt, miljövänligt rengöringsmedel, avsluta med att torka sitsen torr.



VIKTIGT!

Inget vatten eller annan vätska får komma in i sitsens ventil, se bild.

Sitter Seat får **inte** tvättas med högstryckstvätt eller liknande.

Sitter Seat kan torkas av med desinfektionsmedel.

Sitsen Sitter Seat är utformad för att både små och stora barn skall kunna sitta själva.

Sitsen finns i fem storlekar och flera olika färger förekommer.

Sitsen kan placeras på en vanlig stol eller i en sulky, som tillbehör finns också tre underreden; en golvsits (Floor Base), ett träunderrede med fyra ledade hjul (Mobility Base) och ett träunderrede som står på fyra fötter (Stationary Base)

