

Låsa och låsa upp rullstol

Att låsa upp elrullstolar med VR2- och R-net elektronik

Låsa rullstolen

1. Starta rullstolen
2. Tryck och håll in ON/OFF-knappen tills manöverboxen ger ifrån sig ett pip
3. För joysticken framåt tills det hörs ett pip
4. För joysticken bakåt tills det hörs ett pip
5. Släpp joysticken, manöverboxen ger ifrån sig ett långt pip
6. Rullstolen är nu låst

Om rullstolens startas går den ej att köra. Lamporna för manöverboxens gula hastighetsindikator vandrar upp & ner

Låsa upp rullstolen

1. Starta rullstolen
2. För joysticken framåt tills det hörs ett pip
3. För joysticken bakåt tills det hörs ett pip
4. Släpp joysticken, manöverboxen ger ifrån sig ett långt pip
5. Rullstolen är nu upplåst och går att köra igen

Låsa och låsa upp rullstolen med nyckel (endast för stol med R-net)



VR2



R-net

