

Läs igenom snabbguiden innan du använder iChair elrullstol med Z-styrning d v s vårdarstyrning.
Träna på att köra elrullstolen, utan passagerare, på en öppen plats när du lär dig att köra med Z-styrning.
Prova sedan hur det känns att själv sitta i rullstolen och bli körd innan du kör någon annan i stolen.
Detta ger dig en bättre känsla för hur det kan kännas att sitta i elrullstol och bli körd.



Lyft ALDRIG elrullstolen i Z-styrningen

- Lyft EJ elrullstolen i stöd/säkerhetsbågen.
- Belasta inte Z-styrningsbågen med väskor eller dylikt.
- Dra ej frikopplad rullstol med hjälp av Z-styrningen.




Låt elektroniken göra jobbet!

Använd EJ vårdarstyrningen som manuell hävstång, då belastas ryggrören och styranordningen kan deformeras.



Kontrollera alltid att joystickens styrpinne sitter i Z-styrningens spår, se bild.

- Joystickens styrpinne ska vara centrerad i Z-styrningens spår.
- I viloläge får styrpinnen ej vara i kontakt med sidorna.
- Om joystickens styrpinne inte sitter i Z-styrningens spår får rullstolen EJ ANVÄNDAS!
Då är vårdarstyrningen felmonterad eller defekt.
- Kontrollera alltid att körhandtagen (i gummi) sitter fast ordentligt och inte har börjat glida mot mitten så de riskerar att komma i kontakt med/eller tar i varandra.
Ett finger ska få plats mellan körhandtagen.

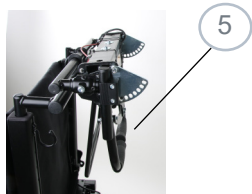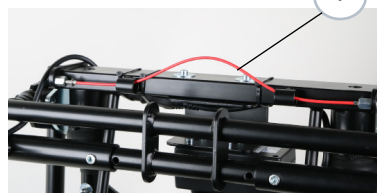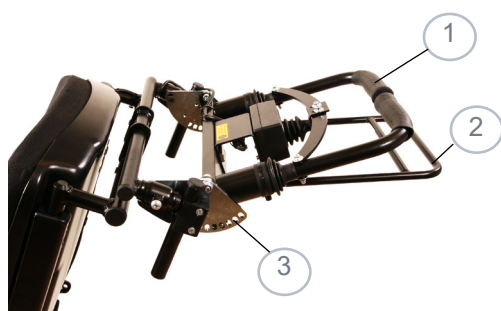

Höjdställning

Z-styrningen går att reglera och justera i höjd för att få den individuellt inställd. **Kom ihåg att stänga av rullstolen när du ska justera höjden!**

- Håll i stöd/säkerhetsbågen (2) och dra sedan i vajern (4) som lösgör spärrarna i mekanismen. Förändra höjden på körhandtagen (1) genom att föra stöd/säkerhetsbågen till önskad höjd, släpp sedan vajern.
- Försäkra dig om att de två spärrarna i mekanismen sitter i varsitt hål (3). Mekanismen har 6 st valbara höjdlägen för körbågen.

Fällning

Det är bra att fälla Z-styrningen om man ska in i ett trångt utrymme eller om man ska frakta stolen i t ex en bil.

Stäng alltid av rullstolen vid fällning av Z-styrningen!

- Håll i stöd/säkerhetsbågen (2) så att den ej faller ner. Dra i vajern (4) och för körbågen nedåt till lodrätt läge (5).

OBS!


Vårdarstyrningen får ej vara aktiv eller användas i nerfällt läge.




Körhandtag och stöd/säkerhetsbåge



Vid körning med Z-styrning, greppa tag om stöd/säkerhetsbågen

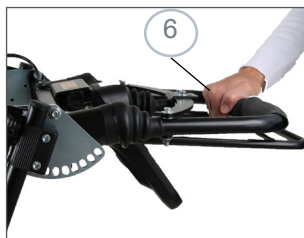

För komfortkörning och jämnare hastighet, håll i stöd/säkerhetsbågen när du kör

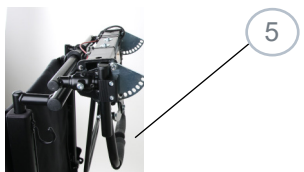

Att köra med vårdarstyrning

Starta rullstolen på PÅ- och AV-knappen som sitter på manöverboxen. Vänta 5 sek.

Vid dubbelkommando sitter PÅ- och AV-knappen på den främre manöverboxen.

- Då rullstolen ska köras trycks körhandtagen (1) mjukt nedåt mot stöd/säkerhetsbågen (2).
- Håll fingrarna runt stöd/säkerhetsbågen och kläm åt (6).
- För att svänga förs körhandtagen (1) åt sidan. För att svänga åt höger för körhandtagen åt vänster och för att svänga vänster för körhandtagen åt höger.

Kom ihåg att släppa taget om stöd/säkerhetsbågen (2) när du ska svänga!

- För att backa lyfts körhandtagen (1) mjukt uppåt. För körhandtagen åt det håll du vill backa. Om du vill backa åt vänster, för körhandtagen åt vänster och tvärt om för höger. Var uppmärksam så att du inte backar in i någonting!

Z-styrningen är utrustad med en förlängd stöd/säkerhetsbåge (2) för att förhindra att du fastnar med händerna mellan kroppen och körhandtagen. Tack vare det kan körhandtagen fortfarande tryckas nedåt och du kan köra framåt om du skulle backa in i någonting.

OBS!

Om ni ska in i ett trångt utrymme, vid toalettbesök eller liknande, **stäng av elrullstolen!**

Fäll ner vårdastyrningen i lodrätt läge (5). Frikoppla motorena, se vidare elrullstolens bruksanvisning, för att kunna manövrera elrullstolen som en manuell rullstol.

Frikoppla ALDRIG elrullstolen i en lutning eftersom du inte orkar hålla tyngden från både rullstolen och brukaren!

TIPS!

När ni ska gå längre sträckor är det bra att ställa in en lämplig gånghastighet på hastighetsregalget, se vidare bruksanvisningen för manöverboxen. Tryck körhandtagen mjukt nedåt mot stöd/säkerhetsbågen och håll i den. Därigenom fås en jämn hastighet, bra körkomfort för passageraren samt avlastning i axlarna för den som kör rullstolen.

Om du upplever att det går för fort när ni är ute och kör eller att det inte går som ni vill – **släpp körhandtagen!** Då stannar elrullstolen.



7

Viktigt att tänka på!

Generellt för alla modeller av elektroniker gäller att man inte får köra/röra manöverboxen/körhandtagen innan elektroniken har säkerhetstestat alla funktioner. Skulle du röra körhandtagen innan testen är utförd flaggar elektroniken fel i displayen. Stäng då av genom att trycka på PÅ- och AV-knappen (7) och starta stolen på nytt.

Z-styrningen är framtagen för att man ska köra utomhus. Undvik att köra i trånga utrymmen. Var extra försiktig när du backar in i hiss eller när du backar mot en vägg. För att undvika att man fastnar mellan rullstolen och väggen finns stöd/säkerhetsbågen (2) som möjliggör att du kan släppa dina händer från körhandtagen och att rullstolen därmed stannar.

Var försiktig när du kör rullstolen på lyftramp t e x färdtjänstbuss, så att du inte oavsiktligt kommer åt körhandtagen och kör av rampen. Stäng alltid av elrullstolen under pågående lyft och hissfärd.