

# Precision® nyfödd

## Identitetsband

### Bruksanvisning

1.



Skriv ut patientidentifikationen och riv av id-bandet från rullen

2.



Tryck nedåt för att lossa id-bandet från resten av pappersarket enligt instruktion

3.



Separera id-bandet från resten av pappersarket

4.



Trä id-bandets ände genom slitsen

5.



Justera bandet runt barnets handled

6.



Ta bort fliken från änden av armbandet för att exponera limmet

7.



När bandet är lagom spänt trycker du det mot klistermassan för att fästa och säkra

8.

