

Uni Cover

Universallamphandtagsskydd

Bruksanvisning

1.
Håll i den nedre delen av lamphandtagsskyddet, placera dina fingrar runt ringen i botten. Den övre delen av lamphandtagsskyddet är markerad med en pil.

2.
Placera den nedre delen av lamphandtaget i mitten av lamphandtagsskyddet så att pilen är riktad uppåt mot lamphandtaget.

3.
Tryck lamphandtagsskyddet uppåt samtidigt som du vrider det för att det enkelt ska glida uppåt - se till så att det sitter fast ordentligt på lamphandtaget.

4.
När det kirurgiska ingreppet är klart, ta av lamphandtagsskyddet genom att dra det nedåt från lamphandtaget.

