



Bruksanvisning

1.
Skriv patientdata för hand eller fäst en klisteretikett med patientdata på tillhörande etikett
Stick in etiketten i bandets ficka. Drag bort skyddspapperet, vik fliken över öppningen och tryck till

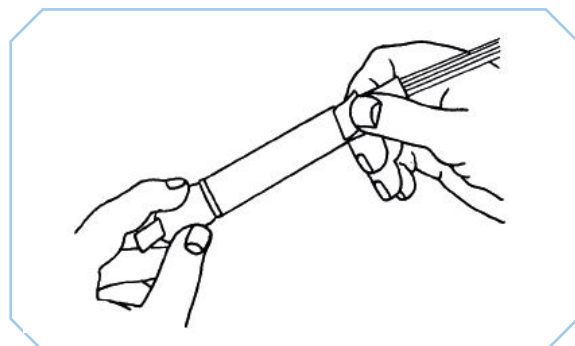


2.
Kontrollera patientens identitet mot Id-bandet enligt rutin. Sätt bandet runt patientens hand- eller fotled.
Skjut in "pilen" under den långa delen av skyddspapperet

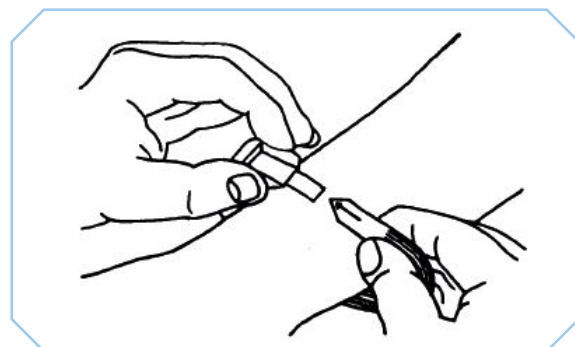


3.
Spänn bandet så mycket att ett finger får plats under bandet.
OBS!! Håll inte tummen på tejpens.
Drag försiktigt bort skyddspapperet



4.
Använd tumme och pekfinger och tryck ihop.
Gnugga gärna lätt så fastnar bandet bättre.

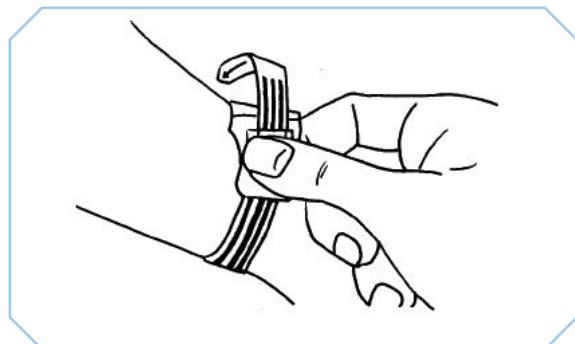

5.
Klipp alltid bort den del av bandet som blir över

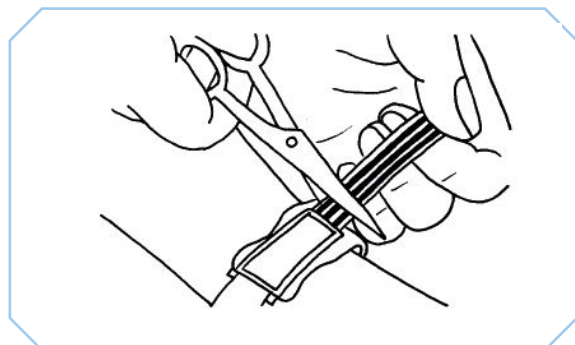

Bruksanvisning

1.
Skriv patientdata för hand direkt på bandets skrivyta
2.
Kontrollera patientens identitet mot Id-bandet enligt rutin. Sätt bandet runt patientens hand- eller fotled. Skjut in "pilen" under den långa delen av skyddspapperet
3.
Spänn bandet så mycket att ett finger får plats under bandet.
OBS!! Håll inte tummen på tejpens.
Drag försiktigt bort skyddspapperet
4.
Använd tumme och pekfinger och tryck ihop.
Gnugga gärna lätt så fastnar bandet bättre.
5.
Klipp alltid bort den del av bandet som blir över

