


Kortbruksanvisning

För autopress>e



Observera bruksanvisningen! Det är varje enskild användares ansvar att informera sig om utrustningens rätta användningsområde och handhavande innan den tas i drift.

autopress>e

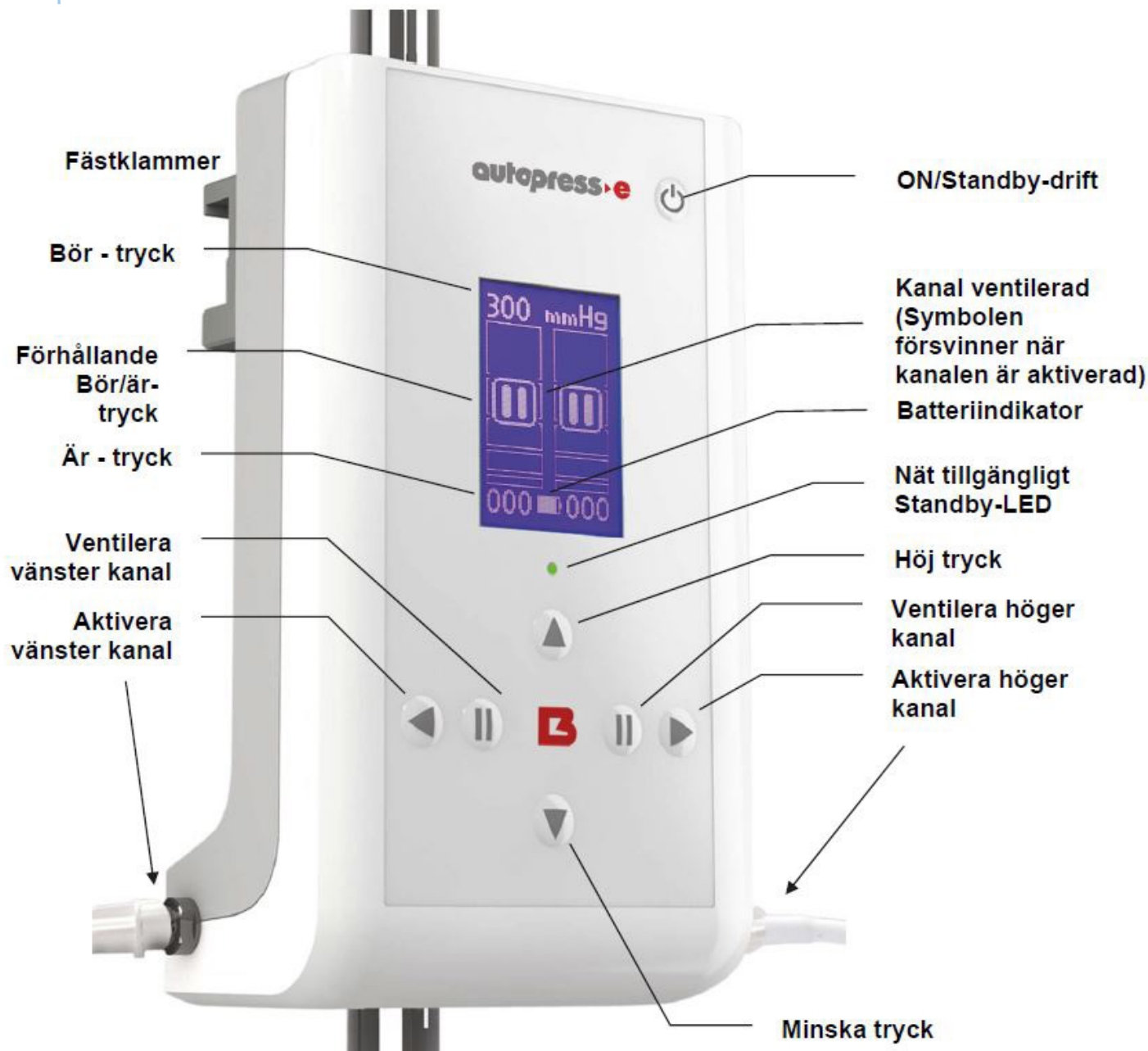

1. Sätt in infusions- eller vätskepåsen i övertrycksmanschetten och anslut sedan infusionen eller spolningen till patienten
2. Skruva på manschetten med Luer-kontakten på autopress>e
3. Slå på apparaten genom att trycka på knappen uppe till höger.
4. Förinställ önskat tryck med piltangenterna och (i steg om 10 mmHg)
5. Starta uppumpning i önskad kanal med vänster eller höger START-knapp
6. Trycket i båda kanalerna kan ändras med piltangenterna och vid behov
7. Genom att trycka på PAUSE-knappen reduceras trycket i systemet i respektive kanal eller så ventileras systemet.

Under patientöverföring kan apparaten kopplas från nätet under drift utan att stängas av. Litiumbatteriet tar över strömförsörjningen för apparaten och trycket i påsen bibehålls.

För ytterligare info. och instruktionsvideo:
<https://www.biegler.com/en/autopress>

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK
www.biegler.com