


# Monidrop® W-infusionsmonitor – Snabbguide


Monidrop-infusionsmonitor är avsedd att användas för att mäta mängden administrerade IV-vätskor vid infusionsbehandling. På monitorn visas infusionshastighet, total administrerad vätskemängd och behandlingstid.

 **Monidrop KAN INTE ANVÄNDAS FÖR ATT ÄNDRA infusionshastigheten. Använd ALLTID rullklämman för att ändra infusionshastigheten. Öppna aldrig rullklämman helt.**

## 1. Starta och använd Monidrop-enheten




- Starta monitorn genom att trycka på strömknappen. 
- Anslut Monidrop till droppkammaren (se instruktionerna i avsnitt 2). Justera till önskad infusionshastighet med rullklämman.

Stäng av monitorn genom att hålla strömknappen nedtryckt  i tre (3) sekunder. När monitorn stängs av raderas alla tidigare angivna data och inställningar.


Den valda infusionstiden och infusionshastigheten (ml/h) samt den administrerade vätskemängden under behandlingen (ml) visas på Monidrop.

## 2. Ansluta Monidrop till droppkammaren


a. Öppna låsbygeln som håller fast monitorn genom att trycka på spärren och dra upp bygeln.

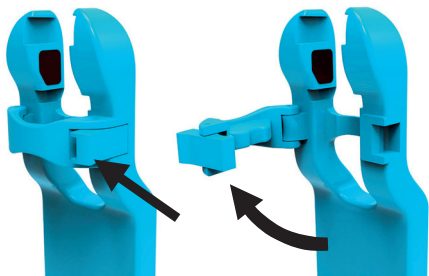

b. Placera droppkammaren i rätt läge. Observera att olika typer av droppkammare måste placeras på olika sätt.

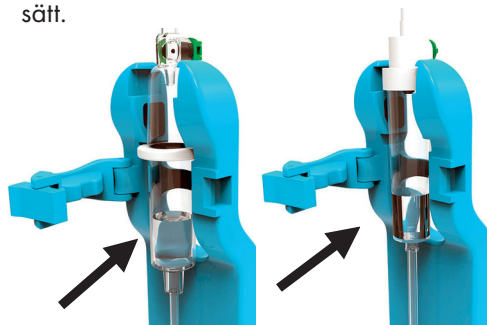

c. Tryck tillbaka låsbygeln till ursprungsläget så att den klickar på plats.

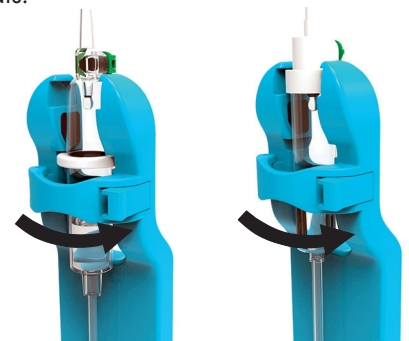



## 3. Justera infusionshastigheten och övervaka behandlingen

Justera infusionshastigheten med rullklämman på infusionssetet med rätt måtnoggrannhet. En grön LED-indikator och en droppikon på skärmen visar att IV-administrering pågår.




## 4. Hantera notifieringar med ljud

a. Notifieringsljud kan tystas och aktiveras med notifieringsknappen.  Ljudavstängningsikonen visas högst upp på skärmen när infusionshastigheten mindre än 6 ml / h är avstängd.  Notifieringar om infusionshastighet under 6 ml / h visas alltid utan ljud som standard när monitorn är på.

b. Om du trycker på knappen aktiveras ljudsignaler för notifieringar för infusionshastighet under 6 ml/h.

## 5. Skärmvisning

Under behandlingen visas infusionshastigheten och den totala infusionsvolymen på monitorskärmen. Funktionerna beskrivs nedan.

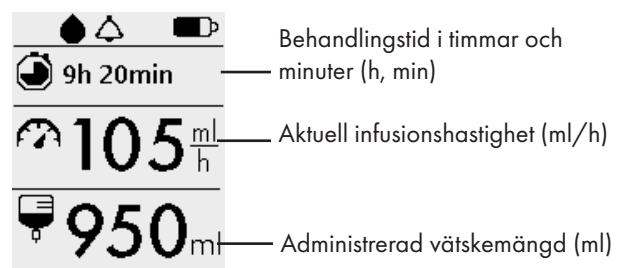

FI Lue lisätietoja laitteen käytöstä ja ominaisuuksista lataamalla Monidrop® W käyttöohje osoitteesta [www.monidor.com](http://www.monidor.com)

EN For additional information on the use and features of the device, the Monidrop® W user manual can be downloaded from [www.monidor.com](http://www.monidor.com)

SV Mer information om mätarens funktioner och hur den används, Monidrop® användarhandboken kan hämtas från [www.monidor.com](http://www.monidor.com)

DE Für weitere Informationen über die Verwendung und Funktionen des Geräts kann die Monidrop®-Bedienungsanleitung von [www.monidor.com](http://www.monidor.com) heruntergeladen werden

NL Download de handleiding van de Monidrop® voor meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van het apparaat. De handleiding vindt u op [www.monidor.com](http://www.monidor.com)

DA Yderligere oplysninger om brugen af enheden og dennes funktioner fremgår af brugervejledningen, der kan downloades fra [www.monidor.com](http://www.monidor.com)

FR Pour plus d'informations sur l'utilisation et les fonctionnalités de l'appareil, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de Monidrop® sur [www.monidor.com](http://www.monidor.com)

#### Viktiga säkerhetsanvisningar för laddaren:

Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk. När du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa grundläggande säkerhetsanvisningar, till exempel följande: Läs alla instruktioner innan du ansluter strömförsörjningsenheter.

**FARA** - Minska risken för elchock genom att följa dessa instruktioner: En strömförsörjningsenhet ska aldrig lämnas utan tillsyn när den är ansluten. Koppla alltid ur strömförsörjningsenheten från eluttaget omedelbart efter användning.

**WARNING** - Minska risken för brännskador, brand, elchock eller personskador genom att följa dessa instruktioner:

1. Enheten får inte användas som leksak. Var alltid uppmärksam när strömförsörjningsenheten används av eller i närheten av barn.
2. Använd endast den här strömförsörjningsenheten för dess avsedda syfte, enligt den här guiden. Använd endast de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren i den här guiden.
3. Använd aldrig strömförsörjningsenheten om kabeln eller kontakten är skadad, om enheten inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller hamnat i vatten. I sådana fall ska apparaten lämnas tillbaka till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för att undersökas, repareras eller justeras av elektriker eller tekniker.
4. Se till att inga föremål kommer/förs in i öppningarna.
5. Får inte användas utomhus.
6. Laddaren får inte användas i miljöer där aerosoler (sprayer) används eller där syrgas administreras.
7. Använd alltid ett eluttag som finns i närheten och är lätt att komma åt.
8. Dra inte i kabeln när enheten ska kopplas ur. Dra i kontakten, inte i kabeln, för att koppla ur enheten.
9. Enheter utan nivå V-klassificering för effekt får inte längre användas för elektronisk utrustning för hushålls- och kontorsbruk.
10. Kontaktinformation för tillverkaren: Sinpro Electornics Co.,Ltd. No.5, Yanxi St. P.E.P.Z. Pingtung City, Pingtung County 90093, Taiwan