

# Biegler slangset

För Blod och Vätskevärmare BW685/BW685 S  
Steril, 1-stycksförpackad



## Biegler Slangset

Biegler slangset är en förlängningsslang, som används tillsammans med Biegler blod- och vätskevärmare BW685/ BW685 S.

## Montering/instruktion

- Lås slangklämman.
- Slangen lindas och sätts på plats i skårorna. Längden på slangen mellan värmaren och patienten ska vara minst 40 cm och skall ej vara sträckt (se bruksanvisning).
- Ta bort korken ① och anslut slangen till ett blod- eller vätskeaggregat ②
- Öppna slangklämman.

## Förpackning och miljö

Slangsetet är steril, 1-stycksförpackad i peel-open påse, som består av papper och polyeten.  
Steriliseringsmetod ETO.  
Transportförpackningen är av wellkartong

## Material

Nr	Beskrivning	Material
1	Kork för luerlock, hanfattning	LDPE
2	Luerlockfattning	ABS
3	Vitt ljul till slangklämma	PP
4	Vit slangklämma	PS
5	Slang	Mjuk PVC
6	Y-fattning med injektionsport	Polystyren + ABS
7	Slang	Mjuk PVC
8	Luerlock, honfattning	Hård PVC
9	Kork för luerlock, honfattning	LDPE Riblene® FH 20



Art nr	Beskrivning	Storlek mm	Avd förp	Trpt förp
FP4600003	Förlängningsslangset för blod- och vätskevärmare BW 685/BW 685 S Steril, engångs	L 4600 Ø 3,0x4,1	100 st	1x100
FP1002001	Förlängningsslangset för blod- och vätskevärmare BW 685/BW 685 S Steril, engångs	L 3500 Ø 3,0x4,1	100st	1x100

Ftalat- Pyrogen-  
och Latexfri

Kopplas till  
aggregat

