

Save the gonads™



Röntgenskydd för spädbarns fortplantningsorgan

Produktinformation

Save the gonads är ett röntgenskydd för spädbarn.

Barn som vårdas på neonatalavdelningar genomgår många undersökningar och röntgenundersökningar är ofta nödvändiga för att fastställa diagnos eller säkerställa korrekt behandling.

Röntgenstrålning är skadlig och sjuka nyfödda barn borde förstås ha samma rätt till skydd från onödig strålning, som större barn och vuxna.

Skydda de allra minsta

Vid rätt användning av Save the gonads reduceras den radioaktiva strålningen mot fortplantningsorganen markant och påverka framtiden för patienterna i en mycket positiv riktning.

Save the gonads kan användas till båda flickor och pojkar. Genom att vända på hjärtat skyddas båda könen lika bra.


- Vänd hjärtat uppåt för att täcka äggstockarna
- Vänd hjärtat nedåt för att skydda testiklarna

Rengöring och förvaring

Av hygieniskäl är Save the gonads avsedd för enpatientsbruk, men kan användas flera gånger till samma barn.

Skydden kan rengöras med sprit/ytdesinfektion mellan undersökningarna.

Förvara Save the gonads i en återanslutningsbar påse vid patientens säng och byt storlek i samma takt som barnet växer.

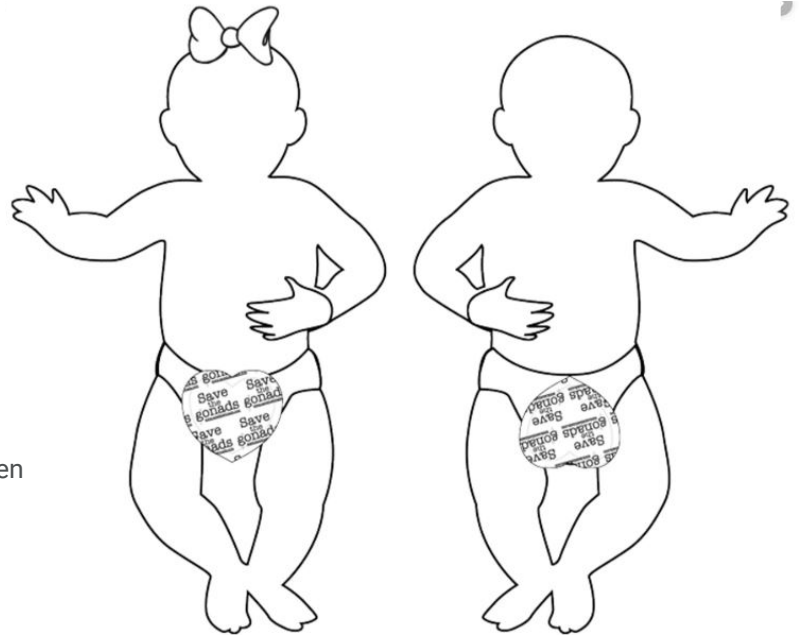

Material och miljö

Bly

Satäng

Latex- och Ftalatfri

Sopsorteras som bly

Produkten är CE-märkt

Förpackning

Styckeförpackade

Engångs/enpatients

Finns i tre olika storlekar



Art nr	Beskrivning	Storlek	förp
900772	NATUS Save The Gonads™ M	Micro-Premature	25 ST
900773	NATUS Save The Gonads™ P	Premature	25 ST
900774	NATUS Save The Gonads™ N	Newborn	10 ST
900775	NATUS Save The Gonads™ S	Blandade 5M 5P 1N	11 st