

Sharps Safety Station™

Skyddsask med bladavdragare och nåldyna
Steril, 1-stycksförpackad



Kontrollsystem och skyddsask

Sharps Safety Station är ett kombinerat kontrollsystem och skyddsask för använda suturnålar och skalpellblad. Askens magneter håller suturnålar och skalpellblad på plats i de nummerade fälten och gör det enkelt och säkert att räkna och kontrollera.

För säker hantering och transport låses asken när den försluts. Den unika låsmekanismen förhindrar oavsiktlig öppning samtidigt som den möjliggör omräkning vid behov.

Inbyggd bladavdragare

För två av våra magnetaskar så finns det en inbyggd universal bladavdragare med enkel och säker funktion. Med ett enkelt handgrepp tar man bort skalpellbladet från skaftet och skalpellbladet ramlar ner i asken.



Säkert skydd mot stick- och skärskador

Askens är lätt att använda och skyddar personalen mot stick- och skärskador. Askens som består av en stark styv konstruktion förhindrar oavsiktlig penetration av förorenade vassa föremål.

Miljöfakta

Produkt-, avdelnings- och transportförpackningarna är tillverkade av material som kan återvinnas.

Ftalat- och latexfri.

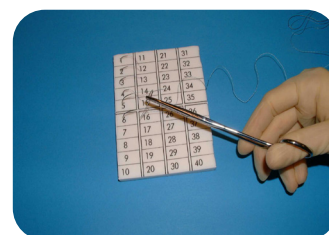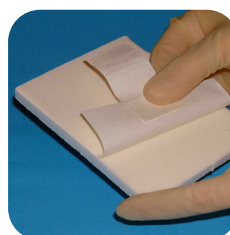

Ta ut nåldynan ur skyddsasken, dra bort skyddspappret och sätt fast dynan på bekväm plats på t.ex. ass-bordet. Stick i nålarna försiktigt och se till att du inte går igenom och gör hål i ass-bordspåsen.

Ett alternativt arbetssätt är att låta nåldynan sitta kvar i skyddsasken och istället dela asken vid gångjärnen. Använd dynan som ovan men sittande kvar i asken. När arbetet är klart sätter du samman halvorna igen, stänger locket så att asken låser sig. Skyddsasken kan öppnas igen om du behöver göra en extra kontroll.

Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trp förp
PS2940	Magnetask Sharps Safety Station 40-nålars, 30-blad med bladavdragare	25 st	25 st
PS2925	Magnetask Sharps Safety Station 20-nålars, 15-blad med bladavdragare	25 st	100 st
PS2910	Magnetask Sharps Safety Station 10-nålars	25 st	100 st