

Uni Cover

Universellt lamphandtagsskydd



Användningsområde

Uni Cover lamphandtagsskydd är en unik och enkel lösning som skyddar lamphandtag vid kirurgiska ingrepp i operationsrum. Lamphandtagsskyddet är universellt och passar alla lamphandtag på marknaden


Kostnadsbesparande system

Lamphandtagsskyddet eliminerar behovet av kostsamma adaptrar som för närvarande används till andra lamphandtagsskydd. En lösning som möter det växande antalet av lamphandtag utan tillgängliga universella adaptrar. Uni Cover lamphandtagsskydd bidrar även till sparad tid som annars läggs på att identifiera, beställa och installera lamphandtagsskydd till både befintliga och nya kunder.

Uni Cover eliminerar även den annars kostsamma utvecklingen och lagringen av det ständigt växande utbudet av universella adaptrar.

Trä på lamphandtagsskyddet

Lamphandtagsskyddet är engångs, sterilförpackat klart att använda. Öppna förpackningen, vik ut skyddet och trä det på handtaget. Skulle lamphandtagsskyddet av misstag kontamineras under pågående operation är det bara att trä på ett nytt, sterilt lamphandtagsskydd över det kontaminerade. När operationen är klar drar man av lamphandtagsskyddet och kastar det.

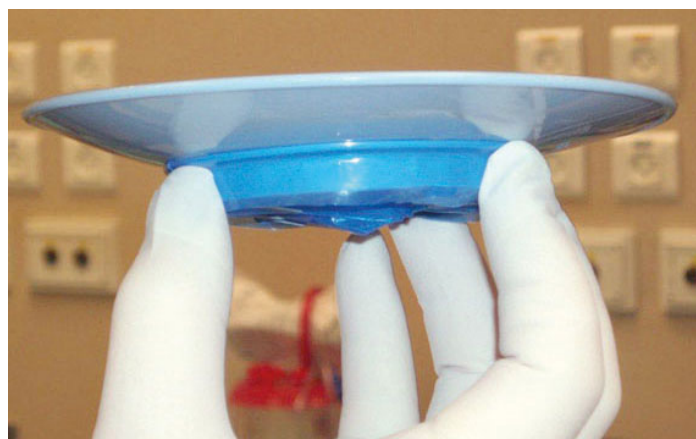

Miljöfakta

Lamphandtagsskyddet är tillverkat av polyeten samt är latexfritt.

Förvaring

Temperatur 15-25°C Luftfuktighet 40-50% RH

Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
NS-0-111001	Uni Cover Lamphandtagsskydd	60 st	240 st